

## Zibo Flow Auto Top

# Selvindstillelig, dynamisk, trykaflastende madras

Zibo Flow Auto Top er en innovativ nyhed inden for tryksårsforebyggelse. Den dynamiske luftmadras forbedrer komforten for brugeren og letter arbejdet for plejepersonalet.



### Madrasen

Zibo Flow Auto Top består af 17 luftceller, som alle er lavet af TPU. Det gør madrassen helt lydløs, når patienten forflytter sig, og giver et mere fast fundament til forflytning på madrassen. Samtidig giver den bløde overflade på cellerne en bedre komfort. De 8 midterste celler er ventilerende. Det forebygger fugtdannelse, hvilket sikrer et bedre mikroklima mellem madras og borger. Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1-4.

### Automatisk brugertilpasset pumpe

Pumpen i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt, og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidstinterval på 5, 10 eller 15 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt finjusteres, over 5 niveauer. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Autofirmfunktionen gør madrassen helt fast ved fx pleje og forflytninger. Auto-firm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service går en audiovisuel alarm i gang.

### Fokus på håndterbarhed og brugervenlighed

Zibo Flow Auto Top er nem at håndtere både før og efter brug. Service er nemt og billigt. Skulle en celle blive defekt, kan den nemt udskiftes. Den store lynlås gør det hurtigt at fjerne eller skifte betrækket ved vask.

### Sikkerhedsmadras

Der skal altid anvendes en minimum 6 cm høj sikkerhedsmadras under madrassen. Der findes en lomme under luftcellerne inde i betrækket, hvor sikkerhedsmadrassen ligges bedst.

### Hygiejne

Madrassen lever op til de hygiejniske krav og standarder. Der er et stort overlap hen over lynlåsen, og slangeindgangen i madrassen er et lukket system.

### Rengøring

Både madras og pumpe kan desinficeres med almindelige desinfektionsmidler. Betrækket bør vaskes ved max. 80° C.

## Zibo Flow Auto Top

# Selvindstillelig, dynamisk, trykafastende madras

Takket være de unikke luftceller, er madrassen nærmest lydløs, når patienten forflyttes. Det er med til at give færre opvågninger og forstyrrelser.



### Forebyggelse og behandling

Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1-4.

### Automatisk brugertilpasset pumpe

Madrassen indstiller sig automatisk efter brugerens vægt.

### Brugervenlig

Zibo Flow Auto Top er nem at håndtere både i forhold til vask og service. Enkelte celler kan nemt udskiftes.

### Hygiejne

Lynlåsen er sikret mod indtrængen af fugt, og slangeindgangen i madrassen er et lukket system.

## Tekniske data

### 83x200x13 cm

HMI nr.: 119865

### 88x200x13 cm

HMI nr.: 119867

### Pumpe (inkl.)

2,6 kg | 29x15x31 cm

### Elektricitet AC230V

50 Hz, 500mA

### Lyd: >30 dB

Serviceindikator

Panellås

Sensortechnologi

Alarm til/fra

**Brugervægt:** 30-180 kg.

**Sammensætning:** 17 luftceller

### Materiale:

Betræk: Nylon/PU

Celler: TPU

Bundstykke: PU/nylon

**Funktion:** Automatisk pumpe med indstillelig cyklustid. TPU-celler der øger komforten. 8 ventilerende celler sikrer et bedre mikroklima.

**Vedligeholdelse:** Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.

Vores faglige konsulenter er klar med gode råd og valg af den rigtige specialmadras. Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne. Ring: 70 500 407