



Tekniske data

Madras

83x200x20 cm
HMI nr.: 119861

88x200x20 cm
HMI nr.: 119864

Pumpe (inkl.)

2,6kg | 29x15x31 cm

Elektricitet
AC230V 50 Hz,
500mA

Lyd: >30 dB

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra

Zibo Flow Auto

Selvindstillelig dynamisk trykaflastende helmadras

Madrassen:

Zibo Flow Auto består af 21 luftceller, disse er alle lavet af TPU. Dette gør at madrassen er helt lydløs når patienten forflytter sig, og det giver et mere fast fundament til forflytning på madrassen. Samtidig giver den bløde overflade på cellerne en bedre komfort. Ydermere er madrassens celler designet med Cell-on-cell teknologien, der øger sikkerheden ved strømsvigt da madrassen holder luft i mere end 48 timer efter strømsvigt. De 8 midterste celler er ventilerede, hvilket sikrer et bedre mikroklima mellem madras og bruger, og derved forebygger fugtdannelse. Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.

Automatisk brugertilpasset pumpe.

Madrassens pumpe indstiller sig selv efter brugerens vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 5, 10 eller 15 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt finjusteres på 5 niveauer. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Autofirm-funktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Auto-firm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service, går en alarm i gang. Alarmen er audiovisuel.

Fokus på håndterbarhed og brugervenlighed.

Zibo Flow Auto, er nem at håndtere både før og efter brug. Service er nemt og billigt, og skulle en celle blive defekt kan den nemt udskiftes. Den store lynlås gør det hurtigt at fjerne eller skifte betrækket ifm. vask.

Hygiejne

Madrassen lever op til de hygiejniske krav og standarder. Der er et stort overlap hen over lynlåsen, og slangeindgangen i madrassen er et lukket system.

Rengøring

Både madras og pumpe kan desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max. 80 grader.

Brugervægt	30-180 kg.
Sammensætning	21 Cell-on-cell luftceller
Materiale	Betræk: Nylon/PU, Celler: TPU, Bundstykke: PU/Nylon,
Funktion	Automatisk pumpe med indstillelig cyclus tid. TPU celler der øger komforten. 8 ventilerede celler sikrer et bedre micro klima
Vedligeholdelse	Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.