



Tekniske data

Madras.

83x200x13 cm
HMI nr.: 119865

88x200x13 cm
HMI nr.: 119867

Pumpe (inkl.)

2,6 kg | 29x15x31 cm

Elektricitet AC230V
50 Hz, 005mA

Lyd: >30dB

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra

Zibo Flow Auto Top

Selvindstillelig dynamisk trykaflastende madras

Madrasen:

Zibo Flow Auto Top består af 17 luftceller, disse er alle lavet af TPU. Dette gør at madrassen er helt lydøs når patienten forflytter sig, samt giver en mere fast fundament til forflytning på madrassen, samtidig giver den bløde overflade på cellerne en bedre komfort. De 8 midterste celler er ventilerende hvilke sikre et bedre mikroklima mellem madras og borger, samt forebygger fugtdannelse. Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.

Automatisk brugertilpasset pumpe.

Pumpen i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 5, 10 eller 15 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt finjusteres, over 5 niveauer. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Autofirm-funktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. auto-firm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service, går en alarm i gang. Alarmen er audiovisuel.

Fokus på håndterbarhed og brugervenlighed .

Zibo Flow Auto Top er en madras som er nem at håndtere både før og efter brug. Service er nemt og billigt. skulle en celle blive defekt kan den nemt udskiftes. Den store lynlås gør det hurtigt at fjerne eller skifte betrækket ifm vask.

Sikkerhedsmadras:

Der skal altid anvendes en minimum 6cm sikkerhedsmadras under madrassen. Der findes en lomme under lufcellerne inde i betrækket hvor sikkerhedsmadrassen ligger bedst.

Hygiejne

Madrassen lever op til de hygiejniske krav og standarder. Der er stort overlap hen over lynlåsen og slangeindgangen i madrassen er et lukket system.

Rengøring

Både madras og pumpe kan desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 80 grader.

Brugervægt	30-180 kg
Sammensætning	17 luftceller
Materiale	Betræk: Nylon/PU, Celler: TPU, Bundstykke: PU/Nylon,
Funktion	Automatisk pumpe med indstilling cyclus tid. TPU celler der øger komforten 8 ventilerende celler til at sikre et bedre micro klima
Vedligeholdelse	Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.